

Gebrauchsanleitung

Der Gesichtsschutzschild FaceShield.One wurde zum persönlichen Schutz während COVID-19 Bedrohung entwickelt.

Hersteller: Bluewater Medical GmbH
Faulmannweg 5
D-24148 Kiel
Tel. +49-431-8899 2093
Email: info@bluewater-medical.net
www.faceshield.one



Produktbeschreibung

FaceShield.One ist ein wiederverwendbarer Gesichtsschutz, der gleichzeitiges Tragen einer Kopfbedeckung, korrigierenden Brille oder zusätzlichen Mund-Nasen-Bedeckung ermöglicht. FaceShield.One, Art. Nr. FS1000, wird zerlegt geliefert und besteht aus den folgenden drei Komponenten, die vor dem ersten Gebrauch zusammenzubauen und alle auch einzeln als Ersatzteile erhältlich sind:

<u>Art. Nr.</u>	<u>Beschreibung</u>
FS1100	FaceShield.One Rahmen
FS1200	FaceShield.One Visierfolie
FS1300	Gummiband

Verwendungszweck/Anwendungshinweise

- FaceShield.One schützt vor okularen, oralen und nasalen Gefahren und reduziert damit die Verbreitung des Corona Virus. Ein vollumfänglicher Schutz gegen Viren, Bakterien oder andere biologische Agenzien ist konstruktionsbedingt nur eingeschränkt gegeben.
- Anwendungen des Gesichtsschutzschildes liegen im medizinischen Bereich, der Pflege, dem Rettungswesen und anderen von COVID-19 betroffenen Arbeitsgebieten, welche den gleichen Schutzzweck benötigen.
- Da der Gesichtsschutzschild Personen, die in die Eindämmung der Verbreitung des Corona Virus eingebunden sind, gegen die o.g. Gefahren schützen soll, ist er für vielfältige Bereiche des öffentlichen Lebens und der Arbeitswelt geeignet.
- Der Gesichtsschutzschild bietet keinen Schutz gegen mechanische Einwirkung, Stöße, Splitter, mechanische Teile oder ähnliches.
- Der Rahmen wird aus PA6 im Spritzgussverfahren hergestellt. Die transparente Visierfolie besteht aus Polyethylenterephthalat (PET). Bei dem Kopfgummi handelt es sich um handelsübliches textilummanteltes Gummiband. Unbedenklichkeit: Von den für den Gesichtsschutzschild verwendeten Materialien ist nicht bekannt, dass sie für den Benutzer schädlich sind oder Hautreizungen verursachen. Es kann jedoch vorkommen, dass Materialien, die mit der Haut des Trägers in Kontakt kommen, bei anfälligen Personen allergische Reaktionen hervorrufen können.
- Die FaceShield.One Visierfolie soll ausgetauscht werden, wenn sie zerkratzt, rissig oder anderweitig beschädigt ist, Änderungen in Form oder Farbe zeigt, Chemikalien, Ölen oder Fetten, großer Hitze oder über lange Zeit der Sonne ausgesetzt war. Schäden sind für den Verwender möglicherweise nicht sichtbar.

Warnhinweise

Der Gesichtsschutzschild FaceShield.One ist nicht für die folgenden Zwecke geeignet:

- zum Schutz gegen mechanische Einwirkung
- zum Schutz gegen brennende, sich zersetzende oder durch chemische Wirkung auflösende Stoffe wie Säuren, Lichtquellen, Gase oder Dünste jeglicher Art
- gegen Funken, Bestrahlung
- zum Schutz vor ionisierender oder nicht-ionisierender Strahlung
- beim Rauchen oder während jeglicher Tätigkeiten mit oder in der Nähe von Flammen oder wärmependenden Geräten

FaceShield.One kann nur bei ordnungsgemäßer Montage und richtiger Anpassung die bezweckte Sicherheit gewährleisten. Abnehmbare Teile dürfen nicht separat getragen werden. Das Produkt darf vom Anwender nicht modifiziert werden.

Die Nichtbeachtung dieser Information und Hinweise sowie die unsachgemäße Verwendung des Produktes können zu Gesundheitsschäden führen, die eventuelle Gewährleistungs- oder Haftungsansprüche nichtig machen. Es obliegt dem Anwender, die Eignung der persönlichen Schutzausrüstung zu prüfen.


Hinweise zur Lagerung

Die Verwendungsdauer beträgt 1 Jahr nach Herstellungsdatum gemäß Kennzeichnung auf der Verpackung. Das Produkt ist bei -20°C bis +55°C zu lagern.

Montage vor dem ersten Gebrauch

FaceShield.One wird platzsparend zerlegt geliefert und muss vor dem ersten Gebrauch in wenigen einfachen Schritten montiert werden:

1. Beim Rahmen muss das Logo nach oben und die flache Produktseiten nach unten weisen.
2. Der Rahmen weist am vorderen Ende eine doppelte Schiene zur Aufnahme der am oberen Rand gelochten Visierfolie auf, welche von 4 kurzen Stiften im Rahmen fixiert wird. Führen Sie dazu die Folie von unten in den Rahmen ein und haken Sie zunächst die äußeren beiden Löcher ein. Die Visierfolie bleibt an diesen beiden Punkten fixiert noch beweglich. Spreizen Sie dann die Schiene leicht auf, um auch die mittleren beiden Löcher der Folie einzuhaken.
3. Der Rahmen ist auf jeder Seite mit 3 Schlitzern zur Aufnahme des 30 cm langen Kopfgummis ausgestattet. Das Gummiband wird wie folgt eingefädelt:

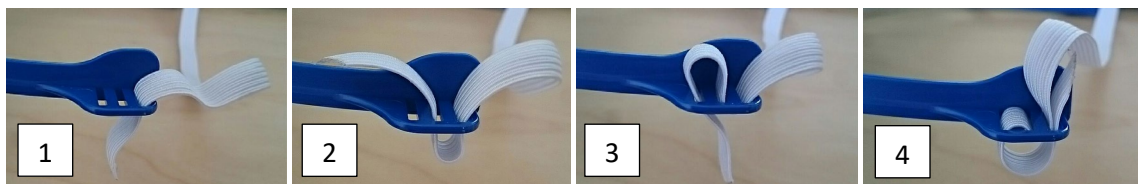

Verfahren Sie auf der anderen Seite in gleicher Weise. Stellen Sie das Gummi für Ihre Kopfweite so ein, dass der Gesichtsschutzschild bequem sitzt und nicht von der Stirn rutscht.

Reinigungsanleitung

Die Visierfolie ist sofort einsatzbereit, aber produktionsbedingt mit einer Schutzschicht versehen, die bei Kontakt mit Flüssigkeiten und deren Verreiben Schmierspuren hinterlässt. Bei erstmaliger Reinigung lässt sich der Schutzfilm am besten in demontiertem Zustand durch Abreiben mit klarem Wasser und einem Mikrofasertuch entfernen, bis keine Rückstände mehr erkennbar sind. Danach können Rahmen und Visierfolie mit üblichen Reinigungsmitteln oder Seifenlauge gereinigt und mit Alkohol oder Isopropanol desinfiziert werden. Verwenden Sie weiche Tücher und eine geeignete Unterlage, um das Visier bei der Reinigung nicht zu zerkratzen.

Sterilisation

Die Bestandteile des FaceShield.One sind bis zu zehn Mal sterilisierbar (Dampf 134°Grad, Haltezeit 5min). Es ist darauf zu achten, dass die Komponenten während des Vorgangs nicht verklemt gelagert werden. Dadurch kann es zu Verformungen kommen.

Hinweise zur Entsorgung

FaceShield.One ist nach der letztmaligen Verwendung zu desinfizieren und über den Hausmüll zu entsorgen.

Produktklassifizierung und Haftungsausschluss

Eingesetzt für den beschriebenen Verwendungszweck erfüllt der Gesichtsschutzschild FaceShield.One die Vorgaben der Verordnung (EU) 2016/425 für persönliche Schutzausrüstung. Ferner erfüllt es die Anforderungen der europäisch harmonisierten Norm EN 166: 2001 (teilweise angewandt). Geprüft und zertifiziert hat dieses Augenschutzprodukt die benannte Stelle: ECS GmbH, Hüttfeldstraße 50, 73430 Aalen, Deutschland (NB 1883) Alle relevanten Kennzeichnungen sind dem Produktetikett auf der Verpackung zu entnehmen. Eine Verpackungseinheit enthält 1 Stück FaceShield.One Gesichtsschutzschild.

Dokumentdownload

Elektronische Versionen dieser Gebrauchsanleitung sowie der Konformitätserklärung stehen im PDF Format zum Download bereit auf www.faceshield.one.